



Attends *Een hele zorg minder...*

Aanleginstructiefolder

PaperPak Nederland bv


De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

Telefoon: 0321 385430
Fax: 0321 385429
Product- en informatiesite: www.attends.nl
Bedrijfsinformatie: www.paperpak.com
Algemeen e-mailadres: info@attends.nl


Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Attends worden gebruikt of gereproduceert (copyright Attends ©).
Grafische Vormgeving en illustraties: id studio grafische communicatie.

Aanwijzingen voor het fixeren van Attends Soft en Discrete

Inleggers kunt u in uw ondergoed dragen. De kleefstrips aan de achterzijde zorgen ervoor dat de inlegger op de juiste plaats blijft.

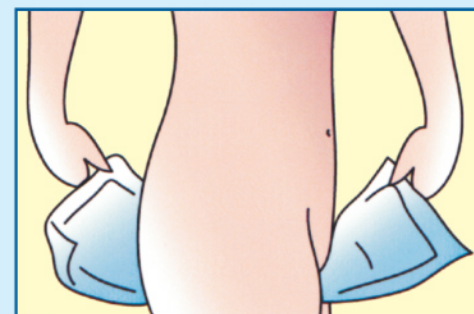

1 Verwijder de plakstrips en plaats de inlegger tussen de benen. Trek uw slip omhoog tot net onder het kruis en positioneer de inlegger op de juiste plaats in uw slip.

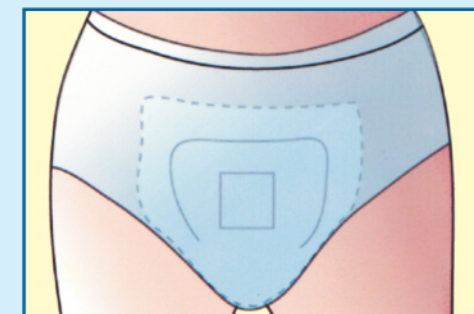

3 Druk de kleefstrip goed aan en trek nu uw slip volledig aan.




Is de inlegger verzadigd? Verwijder de inlegger uit uw slip en gooi hem op hygiënische wijze weg.

Nooit door het toilet spoelen!


Attends Soft en Discrete zijn beiden verkrijgbaar in de absorptieniveaus 1 t/m 4.

Aanwijzingen voor het fixeren van Attends for Men


Attends for Men is speciaal ontworpen voor lichte incontinentie bij mannen en heeft dus ook een andere bevestigingswijze dan de lichte producten voor vrouwen. Zo gebruikt u Attends for Men.

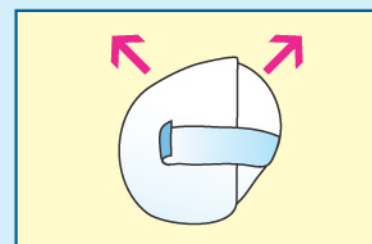

1 Zorg dat het product op de juiste wijze is uitgevouwen met het bredere deel van de inlegger naar boven wijzend (zoals met de pijltjes op de plakstrip staat aangegeven).

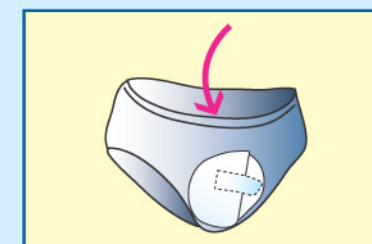

3 Plak de inlegger in uw slip.

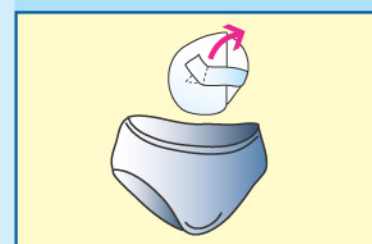

2 Plaats de inlegger in uw slip en vergeet niet eerst de plakstrip te verwijderen.



4 Gebruik de inlegger niet in een boxershirt of loszittend ondergoed.



Is de inlegger verzadigd? Verwijder de inlegger uit uw slip en gooi hem op hygiënische wijze weg.

Nooit door het toilet spoelen!

Attends For Men is verkrijgbaar in absorptieniveaus 1 en 2.

Beste lezer(es),

Volgens the Association for Continence Advice, het adviesorgaan op het gebied van continëntie in het Verenigd Koninkrijk, kan het leven met incontinentieklachten vergemakkelijkt worden door de juiste producten te gebruiken. Attends draagt hieraan bij door een scala aan doeltreffende incontinentieproducten aan te bieden.

In deze folder vindt u aanleginstructies voor elke groep producten. Door deze aanleginstructies op te volgen zorgt u ervoor dat de producten van Attends op de juiste manier worden aangebracht en zij optimaal kunnen functioneren. Het comfort voor de gebruiker wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.


Kortom, een op de juiste manier aangelegd product zorgt voor een comfortabeler leven voor de gebruiker.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op het telefoonnummer dat achterin deze folder staat.

Met vriendelijke groet,


Patrick Wemmenhove
Sales en Marketingmanager Attends Nederland



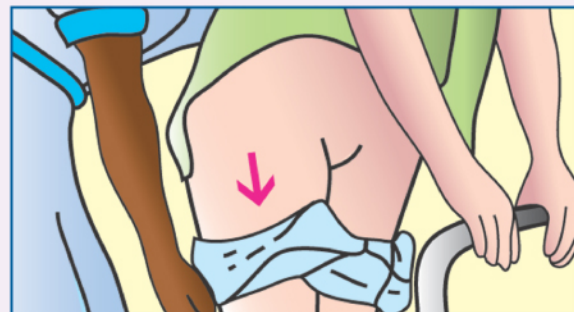

Staand


1 Trek het stretchbroekje omlaag tot net boven de knie. Sla de boord rond het middel naar de knie toe om.

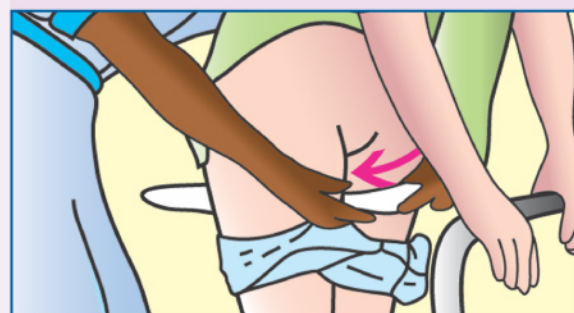


2 Vouw de inlegger voorzichtig over de gehele lengte, zodat deze komvormig wordt en daardoor beter kan worden ingelegd. Plaats de inlegger tussen de benen met het brede oppervlak aan de rugzijde.



3 Strijk de inlegger glad en trek het stretchbroekje omhoog tot in de lies voor een nauwsluitende pasvorm. Zorg ervoor, dat het broekje de inlegger bedekt en dat de waterdichte onderlaag niet naar binnen gevouwen is.

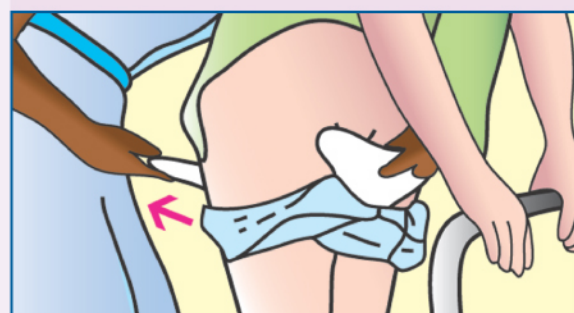

4 Controleer met behulp van de vochtindicator of de inlegger vervangen dient te worden. Trek, indien de inlegger verzadigd is, het stretchbroekje omlaag tot boven de knie en verwijder de gebruikte inlegger vanaf de rugzijde. Indien de inlegger droog en schoon is, kan deze, indien nodig, nogmaals ingelegd worden.

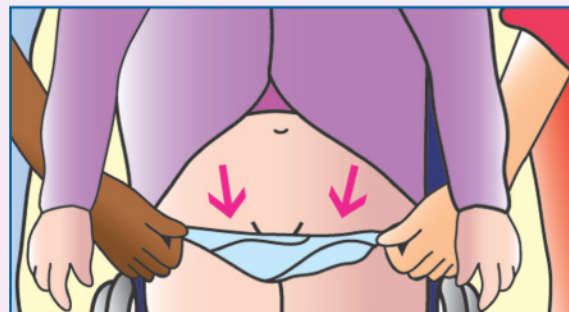


Zittend

1 Til de gebruiker op uit de stoel. Trek het stretchbroekje omlaag tot boven de knieën en sla de boord rond het middel naar de knie toe om. Laat de gebruiker weer plaatsnemen in de stoel.




2 Vouw de inlegger voorzichtig over de gehele lengte in de hand, zodat deze komvormig wordt en plaats de inlegger tussen de benen met het brede oppervlak aan de rugzijde.

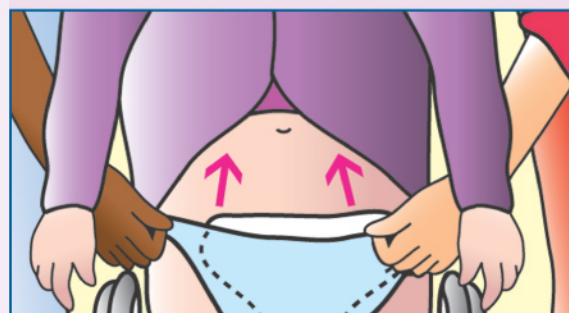

3 Til de gebruiker op en trek de inlegger en het stretchbroekje omhoog. Zorg ervoor, dat de zachte bovenlaag zich aan de binnenkant bevindt en dat de waterdichte onderlaag niet naar binnen gevouwen is.




4 Trek het stretchbroekje zorgvuldig op tot in de lies voor een nauwsluitende, comfortabele en betrouwbare pasvorm. Verwijder de inlegger, indien deze verzadigd is en gooi hem op hygiënische wijze weg. Nooit door het toilet spoelen.

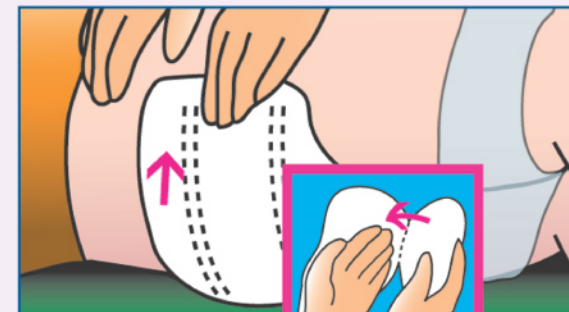


Liggend

1 Draai de gebruiker op de zij en trek het stretchbroekje naar de knie toe. Verwijder eerst, indien nodig, de inlegger vanaf de rugzijde en reinig de huid. Vouw de inlegger voorzichtig over de gehele lengte, zodat deze komvormig wordt en plaats hem tussen de benen met het brede oppervlak aan de rugzijde.

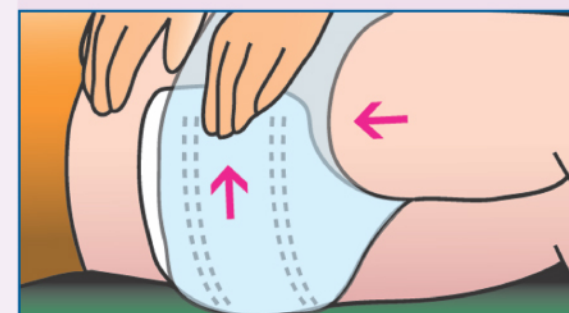

2 Strijk de inlegger aan de voor- en achterkant glad. Zorg ervoor, dat de zachte bovenlaag zich aan de binnenkant bevindt en dat de waterdichte onderlaag niet naar binnen gevouwen is. Trek het stretchbroekje omhoog.

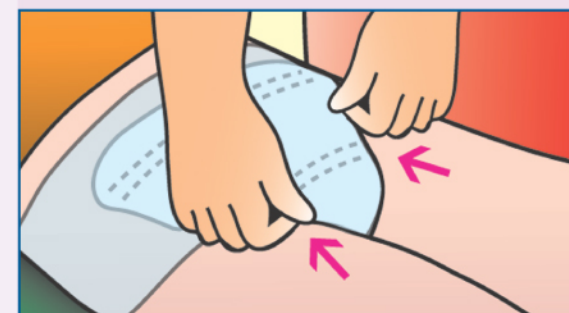

3 Plaats de inlegger in de juiste positie en trek het stretchbroekje zorgvuldig op tot in de lies voor een nauwsluitende pasvorm en een maximale bescherming tegen lekkage. Verwijder de inlegger, indien deze verzadigd is en gooi hem op hygiënische wijze weg. Nooit door het toilet spoelen.



Geschikt voor iedere buik / heupomvang - Kies de inlegger met het juiste absorptieniveau

Attends Contours is verkrijgbaar in de absorptieniveaus 5 t/m. 9

Aanwijzingen & Tips

Soft, Discrete, Contours en Fixatiebroekjes

Keuze

- Maak op grond van de persoonlijke klinische beoordeling een keuze uit inlegger 1-9.
- Kies een broekje op grond van de buik/heupomvang.
- Des te kleiner de gekozen inlegger, des te groter het gevoel van eigenwaarde voor de gebruiker.

Fixatie

- Zorg ervoor, dat de plooi banden zich aan de buitenkant van de slip bevinden, zodat voorkomen wordt dat de waterdichte onderlaag in contact komt met de huid.
- Houd bij het aanbrengen van de slip de plakstrips aan de rugzijde. Op deze manier weet je zeker dat de slip op de juiste manier wordt aangebracht.
- Plak eerst de onderste plakstrips opwaarts vast voor een nauwsluitende pasvorm en de bovenste plakstrips neerwaarts.
- Plaats bij mannen de penis in het midden van de slip.

Verschoning

- Controleer de vochtindicator.
- Indien het product tijdens de toiletgang schoon en droog blijkt, kan de slip opnieuw aangebracht en gebruikt worden.
- Haal de plakstrips van elkaar af door een vinger tussen de blauwe en de witte plakstrips te plaatsen en de witte plakstrips van de blauwe te trekken.
- De plakstrips niet op de huid vastplakken.
- Reinig de huid tijdens het verschonen: werk van voren naar achteren, van schoon naar vuil.
- Schone en droge inleggers kunnen na de toiletgang opnieuw ingelegd worden.
- Verwijder verzadigde inleggers vanaf de rugzijde, indien mogelijk.
- Vermijd overdadig gebruik van zalf en poeder; dit kan de gaatjes van de inlegger verstopen.

Lekkage

- Controleer de pasvorm nauwgezet.
- Controleer de maat.

Verwijdering

- Rol de slip op, zoals het beleid ten aanzien van medisch afval dit vereist (gooi het op hygiënische wijze weg). *Niet door het toilet spoelen.*






Staand


1 Vouw de Attends slip volledig open en plaats de uiteinden met de plakstrips aan de rugzijde. Zorg ervoor dat de waterdichte onderlaag van de slip zich aan de buitenkant bevindt en de zachte, witte bovenlaag aan de binnenkant.




2 Trek de slip omhoog het kruis in, zodat de flexibele plooi banden in de liezen worden getrokken. Zorg ervoor, dat de voor- en achterkant van de slip even hoog zitten.

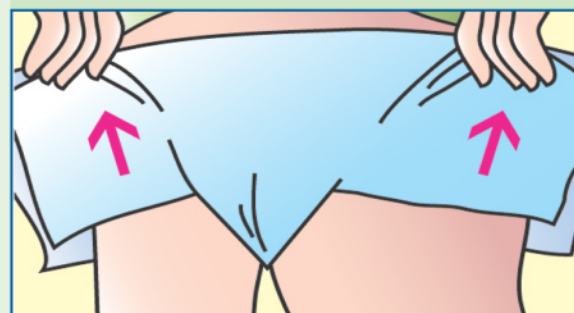

3 Vouw de zijpanelen over de voorkant van de slip. Plak eerst de onderste plakstrips opwaarts vast, zodat de flexibele plooi banden in de liezen vastzitten. Trek de plooi banden aan en vouw ze naar buiten.

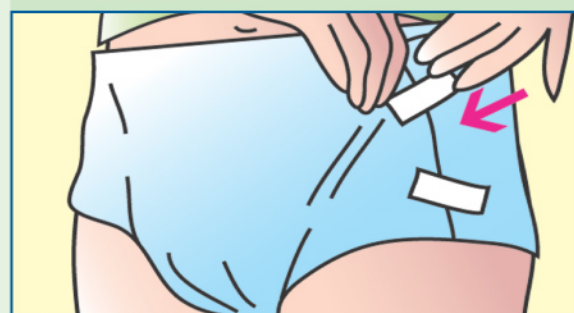

4 Plak de bovenste plakstrips neerwaarts vast voor een comfortabele pasvorm. De pasvorm moet nauwsluitend, maar niet te strak zijn. Trek voorzichtig de witte plakstrip van de blauwe los om de slip te verwijderen. Indien de slip schoon en droog is, kan deze opnieuw aangebracht worden door de witte plakstrips weer op de blauwe vast te drukken.

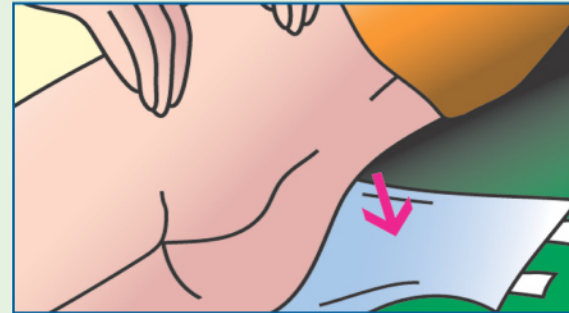

Liggend


1 Draai de klant op de zij. Vouw de Attends slip open en plaats het uiteinde met de plakstrips aan de rugzijde. Zorg ervoor dat de voor- en achterkant van de slip even hoog zitten. Controleer of de zachte, witte bovenlaag zich aan de binnenkant bevindt.




2 Draai de klant op het middenstuk van de slip op de rug. Haal de voorkant van de slip door het kruis naar voren. Trek de plooi banden voorzichtig aan tot in de liezen. Controleer of de plooi banden naar buiten gevouwen zijn.



3 Strijk de zijpanelen glad. Zorg ervoor, dat de voor- en achterkant van de slip even hoog zitten. Plak de onderste plakstrips opwaarts vast.

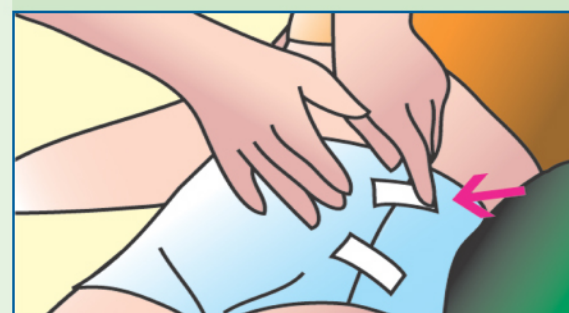

4 Plak de bovenste plakstrips neerwaarts vast voor een comfortabele pasvorm. De pasvorm moet nauwsluitend, maar niet te strak zijn. Verwijder de slip, indien deze verzadigd is en gooi hem op hygiënische wijze weg. Nooit door het toilet spoelen.

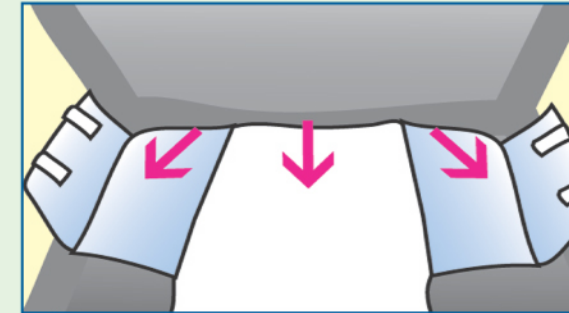


Zittend

1 Vouw de slip open. Plaats het uiteinde met de plakstrips zo ver mogelijk op de stoel. Zorg ervoor dat de witte bovenlaag naar boven gericht is. Vouw alleen deze achterkant open, zodat de slip eruitziet als de letter T.



2 Laat de klant weer plaatsnemen in de stoel. Haal de voorkant van de slip zorgvuldig door de benen naar voren, zodat de slip nauw aansluit in het kruis en de flexibele plooi banden comfortabel in de liezen zitten. Trek de plooi banden aan en vouw ze naar buiten.

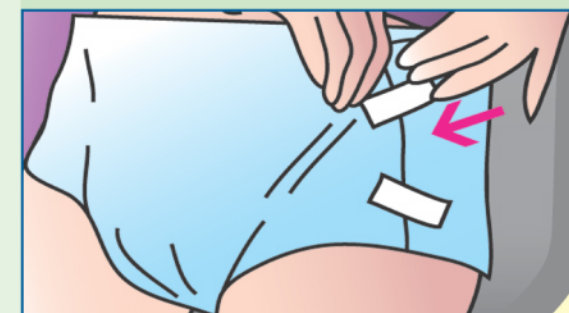

3 Strijk de zijpanelen over de slip en plak eerst de onderste plakstrips opwaarts vast. Plak daarna de plakstrips rond het middel vast voor een comfortabele pasvorm. De pasvorm moet nauwsluitend, maar niet te strak zijn. Verwijder de slip, indien deze verzadigd is en gooi hem op hygiënische wijze weg. Nooit door het toilet spoelen.



Meet, om de juiste maat te bepalen, de omvang van de heup of buik, al naargelang welke het breedst is.

Attends Slips zijn verkrijgbaar in de absorptieniveaus: 8 (maat M en L), 9 (Maat XS t/m L), 10 (maat M en L) en de Special Care Slip 10 (maat M t/m XL).

Aanwijzingen & Tips Slips

Keuze

- Maak op grond van de heup- of buikomvang (al naargelang welke het breedst is) een keuze uit de slips.
- Gebruik liever de inleggers/broekjes van Attends; ze bieden meer discretie dan de slips.
- Raadpleeg de incontinentiewijzer, waarin voor elke incontinentievorm het aanbevolen product wordt weergegeven.
- Slips zijn uitermate geschikt voor personen die de gevormde inleggers uit het broekje trekken.

Fixatie

- Smal uiteinde aan de voorzijde, breed uiteinde aan de achterzijde.
- Vouw de inlegger over de gehele lengte, zodat deze komvormig wordt.
- De anti-lek randen niet aanraken; deze voegen zich automatisch naar de komvorm van de inlegger.
- Plaats de inlegger bij mannen aan de voorkant en bij vrouwen in het midden.
- Controleer of de juiste maat van het stretchbroekje gebruikt wordt.

Lekkage

- Controleer of de aanwijzingen ten aanzien van de fixatie van de inlegger zijn opgevolgd en of de beoordeling van de gebruiker juist is.
- Verhoog slechts het absorptieniveau van de inlegger, indien u er zeker van bent dat de lekkage niet wordt veroorzaakt door de pasvorm of de fixatie van de inlegger.

Verschoning


- Controleer de vochtindicator van inleggers 5-9.
- Indien de indicator voor meer dan de helft van de lengte van de inlegger vervaagd is, dient de inlegger te worden vervangen.
- Reinig de huid tijdens het verschonen: werk van voren naar achteren, van schoon naar vuil.
- Schone en droge inleggers kunnen na de toiletgang opnieuw ingelegd worden.
- Verwijder verzadigde inleggers vanaf de rugzijde, indien mogelijk.
- Vermijd overdadig gebruik van zalf en poeder; dit kan de gaatjes van de inlegger verstopen.

Verwijdering

- Attends broekjes kunnen hergebruikt worden.
- Rol de inlegger op en gooi het op hygiënische wijze weg, zoals het beleid ten aanzien van medisch afval dit vereist. **Niet door het toilet spoelen.**




Aanwijzingen voor het aantrekken van Attends Pull-Ons

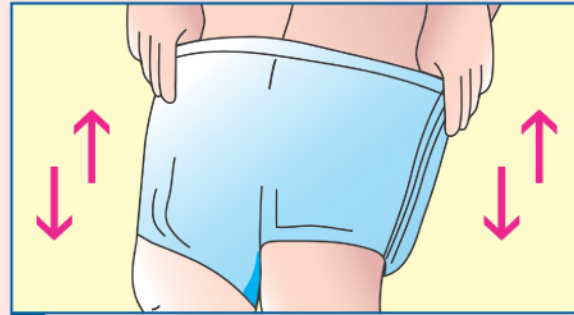


Staand

1 Pull-Ons is net gewoon ondergoed en u trekt de Pull-Ons dan ook op dezelfde wijze aan als uw ondergoed. Wilt u alleen controleren of de Pull-Ons verzadigd is, dan kunt u de Pull-Ons net als ondergoed een eindje naar beneden schuiven.

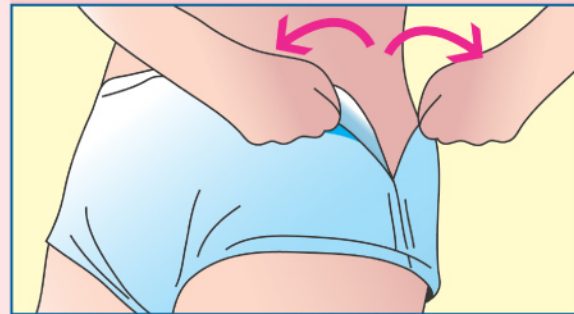

2 Indien de Pull-Ons verzadigd is kunt u de Pull-Ons gemakkelijk uitrekken doordat u beide zijanten kunt losscheuren.

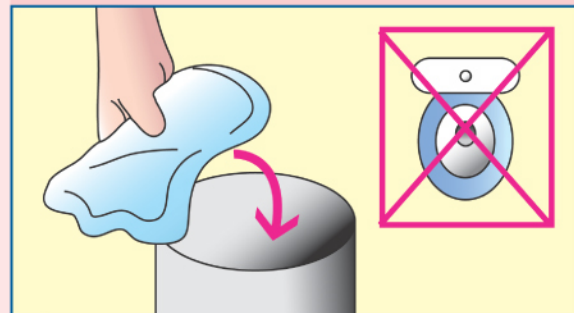

3 Gooi de Pull-Ons op hygiënische wijze weg, maar de Pull-Ons nooit door het toilet spoelen.

Attends
Pull-Ons



Pull-Ons sluiten altijd aan op uw lichaam door de elasticiteit van het broekmodel.

Aanwijzingen voor het gebruik van Attends Cover-Dri

Attends

Attends onderleggers hebben een blauwe antislip laag aan de onderzijde om verschuiven te voorkomen. De bovenzijde is voorzien van een ruitvormig patroon om de vloeistof gelijkmatig over de onderlegger te verdelen.



Onderlegger 60 x 90 cm

De uitvoering 80 x 170 cm is voorzien van twee zijflappen die onder het matras kunnen gestopt worden voor extra fixatie.



Onderlegger 80 x 170 cm

Attends
Cover-Dri



Assortimentsoverzicht *producten zijn gelijk

Soft

Soft ultra mini 0



Art nr 200322 Inhoud 12 x 24

Soft Mini 1



Art nr 200568 Inhoud 8 x 18

Soft Mini Long 1



Art nr 201176 Inhoud 8 x 16

Soft Normal 2



Art nr 200346 Inhoud 8 x 14

Soft Extra 3



Art nr 200360 Inhoud 8 x 12

Soft Super 4*



Art nr 202579 Inhoud 6 x 10

Soft For Men 1



Art nr 410032 Inhoud 4 x 25

Soft for Men 2



Art nr 201787 Inhoud 4 x 16

Discrete

Discrete Mini 1



Art nr 202432 Inhoud 8 x 18

Discrete Mini Plus 2



Art nr 202470 Inhoud 12 x 16

Discrete Normal 3



Art nr 202456 Inhoud 8 x 12

Discrete Normal Plus 4*



Art nr 202388 Inhoud 5 x 42

Contours

Contours Plus 5



Art nr 202531 Inhoud 4 x 35

Contours Extra 6



Art nr 201244 Inhoud 4 x 35

Contours Super 7



Art nr 201268 Inhoud 4 x 28

Contours Super Plus 8



Art nr 201282 Inhoud 4 x 28

Contours Maxi 9



Art nr 201305 Inhoud 4 x 28

Slips

Slip Extra 8



Verkrijgbaar in maat M en L
Art nr M 200728 Inhoud 4 x 28
Art nr L 201329 Inhoud 4 x 28

Slip Super 9



Verkrijgbaar in de maten XS, S, M en L
Art nr XS 201343 Inhoud 6 x 28
Art nr S 201367 Inhoud 6 x 28
Art nr M 202494 Inhoud 4 x 28
Art nr L 201381 Inhoud 4 x 28

Slip Super Plus 10



Verkrijgbaar in maat M en L
Art nr M 201404 Inhoud 4 x 28
Art nr L 201428 Inhoud 4 x 28

Slip Special Care 10



Verkrijgbaar in de maten M, L en XL
Art nr M 201442 Inhoud 4 x 14
Art nr L 201466 Inhoud 4 x 14
Art nr XL 201480 Inhoud 4 x 14

Pull-Ons

Pull-Ons Plus 5



Verkrijgbaar in de maten XS, S, M, en L
Art nr XS 201114 Inhoud 4 x 21
Art nr S 201121 Inhoud 4 x 21
Art nr M 200681 Inhoud 4 x 14
Art nr L 200704 Inhoud 4 x 14

Pull-Ons Super 8



Verkrijgbaar in de maten M en L
Art nr M 200582 Inhoud 4 x 14
Art nr L 200605 Inhoud 4 x 14

Cover Dri

Cover Dri Plus 5



Verkrijgbaar in de maten
40-60, 60-60, 80-170 en 60-90 cm
Art nr 40-60 cm 200926 Inhoud 6 x 50
Art nr 60-60 cm 200940 Inhoud 4 x 50
Art nr 60-90 cm 200988 Inhoud 4 x 50
Art nr 80-170 cm 200780 Inhoud 4 x 30

Cover Dri Super 9



Verkrijgbaar in de maten 60-60 en 60-90
Art nr 60-60 cm 200964 Inhoud 4 x 50
Art nr 60-90 cm 201008 Inhoud 4 x 50

Stretch Fit

Stretch Fit



Verkrijgbaar in de maten S, M en L
Art nr S 372028 Inhoud 3 Stuks
Art nr M 372004 Inhoud 3 Stuks
Art nr L 372042 Inhoud 3 Stuks

Stretch Pant



Verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL, XXL
Art nr S 428051 Inhoud 15 Stuks
Art nr M 703684 Inhoud 15 Stuks
Art nr L 503222 Inhoud 15 Stuks
Art nr XL 328016 Inhoud 15 Stuks
Art nr XXL 203071 Inhoud 15 Stuks

Vragen?

Wanneer u na het lezen van deze brochure toch nog vragen heeft, kunt u onze consumentenlijn bereiken op Telefoonnummer:

0321-38 54 38

Wij staan tijdens werkdagen van 09.00 - 17.00 uur voor u klaar om u advies te geven en uw vragen te beantwoorden.


Attends Een hele zorg minder...